

Gerçek
yaşam için FM

child
friendly
hearing
care



Kolay
kullanım

Daha fazla
konuşmayı işitmek



Her şey onda

Güven
verir

Sağlam
tasarım

Hiçbir çocuk
geri kalmamalı

Gerçek yaşam için tasarlanmıştır

Yeni Amigo T30 ve T31 eğitim amaçlı FM vericileri, en gelişmiş teknolojik tasarıma sahip, gerçek yaşamın gereksinimlerini karşılayan başlıca örneklerdir. Bu nedenle "Kullanıcı dostu FM" sözümüz her şeyin onda olduğunu anlatır.

Sürekli gelişmekte olan Oticon Amigo FM ailesiyle birlikte, Oticon'un sunduğu pediatrik taahhüt çok açıktır. Her durumda (özellikle okulda) Amigo çocuklara en çok ihtiyaç duyduklarını verir. Konuşma gelişimi için maksimum konuşma anlaşılabilirliği, öğrenme ve sosyalleşme.

Dinliyoruz ve çözüm sunuyoruz

Yüzyıldan fazla Oticon her yaştan çocuklar ve yetişkinler için özel çözümler üretmektedir. İşitme cihazı uzmanları ve kullanıcıları karşılaştıkları zorlukları anlattıklarında, onları dinliyoruz ve teknolojik gelişmelerle birlikte onlara yeni çözümler sunuyoruz.

Amigo daha iyi olmaya devam ediyor

Amigo T30/T31 verici gerçek yaşamın gereksinimlerini karşılamak için mükemmel bir tasarımıdır. Öğretmenler ve odyologlar aradıkları kullanım kolaylığını ve güvenilir kaliteyi Amigo'da bulacaklardır. Öğrenciler de, aradıkları pürüzsüz konuşma sesini, konforu, uygulama imkanlarını ve daha fazlasını onda bulacaklardır.

Kullanım Kolaylığı

Amigo T30/T31 ile birlikte, odyologlar tek bir ünite üzerinden bütün programlama ve uygulama imkanlarına sahiptir. Öğretmenler ise, sadece tek bir düğmeye dokunarak derse devam edebileceklerdir.

Daha fazla konuşma için daha fazla frekans alanı

Bazı FM sistemleri bilgi aktarmak için sadece hayatı öneme sahip olan frekans alanını kullanırken, Amigo ek olarak konuşma ipuçlarının bulunduğu yüksek frekansları da kullanır.

Güven verir

Alıcı ve verici üzerindeki LED göstergeler sayesinde, öğretmenler Amigo'nun düzgün çalıştığından emin olabilirler.

Gerçek yaşam için üretilmiştir


Beklemek için zaman olmadığından, Amigo okul ortamında günlük kullanım ve hırpalanmalara dayanacak şekilde üretilmiştir.



adır
FM
made
friendly

Kolay
kullanım

Daha fazla
konuşmayı işitmek

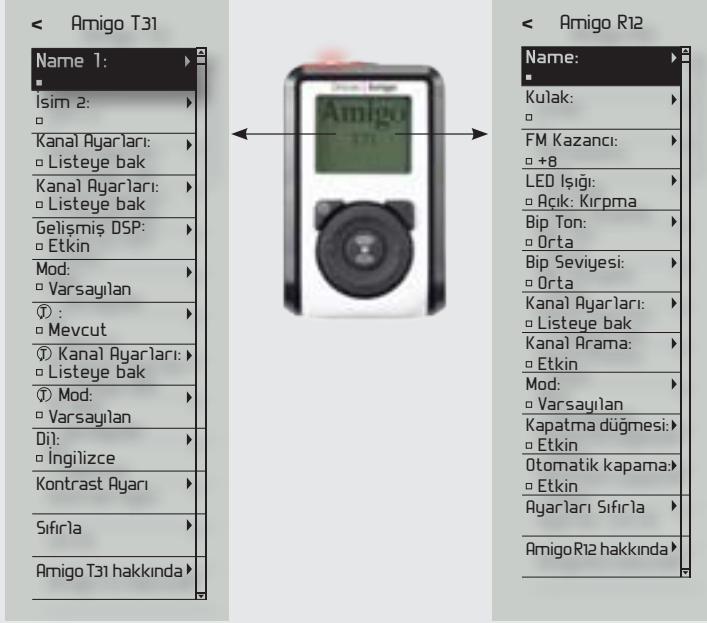

Vericileri programlamak

Amigo T30/T31 program menüsü, Takım Eğitimi, kişisel FM kanalları ve gelişmiş dijital ses işleme gibi özelliklere kolay geçiş imkanı sunar.

Bulunduğunuz yerde alıcıları ayarlayın

Optimum verimlilik için, okulda veya kliniğinizde Amigo alıcıları kulak üzerinde kolayca ayarlanabilir.

Odyoloğa zaman kazandırır

Amigo, sıkıcı olan programlama ve ayarlama zamanını kısaltarak, okul günlerini daha kolay ve daha verimli hale getirir.

Bilgisayarlar, kablolar ve diğer gerekli programlama aygıtları ile odyologların zaman kaybetmesinden öte, Amigo T30/T31 bütün programlama ve uygulamayı avucunuzda yapmanızı sağlar. Önceden programlanmış olan kanallar ve içindeki Kanal Sihirbazı, öncelikli bir kanal listesi

oluşturmanızı gerektirmeyerek size zaman kazandırır. Özel adımları ile sizi yönlendiren basit ve sade menüsü Takım Eğitimi gibi özellikleri kolayca etkinleştirmenizi veya kapatmanızı sağlar. Esnek 1-35cm. programlama mesafesi ile alıcıların güçlü ve kolayca ayarlanmasını sağlar.

Kolay güncelleştirme imkanı

Amigo T30/T31 vericilerinde kolay yazılım güncellemesi sağlamak için özel bir USB girişi vardır. Yeni özelliklere geçiş imkanı olması, Amigo vericilerini zi verimli ve ekonomik yapar.



Güven
verir

Sağlam
tasarım

Hiçbir çocuk
geri kalmamalı



Seçim özgürlüğü

Odyologlar kullanacakları FM sistemi konusunda sınırlandırılmak istemezler. Bu nedenle Amigo tam bir seçim özgürlüğü sunar. Amigo çözümleri bütün kulak arkası işitme cihazları, CI işlemcileri ve diğer markaların FM alıcı ve vericileri ile birlikte sinyal dayanıklılığından ve ses kalitesinden ödün vermeden çalışır.



Kolay
kullanım

Daha fazla
konusmayı iřitmek



Öğretmenin sadece bir düğmeye dokunarak yapabileceği 3 basit işlem:

- Verici ve alıcıları senkronize etmek
- Takım Eğitimi etkinleřtirmek
- Mikrofonu sessize almak



Öğretmen için kolay kurulum.

**Güven
verir**

**Sağlam
tasarım**

**Hiçbir çocuk
geri kalmamalı**



Öğretmenler FM'le uğraşmak istemez

Günlük rutinlerinin bir parçası olarak, öğretmenler FM sistemlerini kullanmak zorunda kalır. Oticon'un taahhütlerinden biri: kullanıcı dostu çözümler üretmek olduğundan, Amigo bu işlemi kolaylaştırır.

Öğretmenler zamanlarını ders anlatmak için kullanmak ister, karmaşık FM sistemlerini çözmek için değil! Amigo T30/T31 ile bütün yapmaları gereken tek bir düğmeye basmaktır. Sadece sağduyulu, güvenilir bir FM desteği ile aksilik yaşamadan günlük rutinlerine devam edebilirler. Yapılan işlemle ilgili hataları önlemek ve istemeyerek ayarların değiştirilmesini önlemek için, ekran anlık doğrulama sağlar.

İstedikleri şekilde kullanabilirler

Amigo T30/T31 yüksek kalitede Omni yaka mikrofonu ile sunulur. Öğretmenin kullanım tercihine uyum sağlamak veya özel bir durum için, ayrıca Direksiyonel veya Boom mikrofonlar da kullanılabilir. Hepsinin mikrofon kablosu içinde dahili bir anten vardır.

İstedikleri şekilde taşıyabilirler

Maksimum rahatlık ve esneklik için, verici bel kemerinde veya cepte taşınabilir.



Kemer klipsi ile bel 'de kullanım.



Omni mikrofon



Boom mikrofon

**Kolay
kullanım**

**Daha fazla
konuşmayı işitmek**



Daha fazla bant genişliği, daha fazla konuşma

Amigo, çok önemli olan konuşma bilgisine, pürüzsüz ve istikrarlı bir erişim sağlamak için, geniş bant alanının her bir parçasını kullanır. Bunu sağlayan başka bir FM sistemi yoktur!

Çocukların okul günleri sürekli değişen dinleme durumları ile geçer (Crukley & Scollie, 2010). İşitme kaybı günlük yaşamı son derece yorucu hale getirir. Gün ilerledikçe eksik bilgi ve talimatların yerini doldurmak artarak daha zor hale gelir, bu da çocuğun öğrenme yeteneğini etkiler. Amigo, çok önemli konuşma bilgilerine pürüzsüz bir erişim sağlayarak, çocuğun takipte kalmasına yardımcı olur.

Yüksek frekanslı sesleri yakalar
Günümüzün gelişmiş işitme çözümle-

rinde, yüksek frekanslı önemli konuşma bilgilerine ulaşmak için genişletilmiş bant alanı kullanılır. Bu FM sistemlerinin de yararlanması gereken bir avantajdır. Araştırmalar gösterir ki, işitme kayıplı çocuklar, daha geniş frekans alanı ile eklenen yüksek frekans bilgilerinden faydalanabilirler (Kortekaas & Stelmachowicz, 2000).

Diğer FM sistemlerinden daha geniş bir frekans alanı ile (8.5 kHz), Amigo T30/T31 vericileri yumuşak ünsüzleri daha belirgin olarak sunabilir. Daha fazla

yüksek frekans bilgisi yakalayan Amigo, daha doğal sese sahip bir konuşma ve dinlemeyi daha az yorucu hale getiren bir ses kalitesi sunar.

Bazı FM sistemlerinde olduğu gibi, alıcı ile sadece iletişim için değerli olan frekans alanını aktarmaktan öte, Amigo T30/T31 frekans alanını konuşma anlaşılabilirliğini arttırmak için kullanır. Maksimum konuşma anlaşılabilirliği, çocuklarda konuşma gelişimi, öğrenme ve sosyalleşmeyi daha kolay hale getirir (Flexer, 1995).


**Güven
verir**

**Sağlam
tasarım**


**Hiçbir çocuk
geri kalmamalı**



Amigo'un 8.5 kHz bant genişliği, genişletilmiş yüksek frekanslı bant genişliğine sahip işitme cihazlarını destekler.

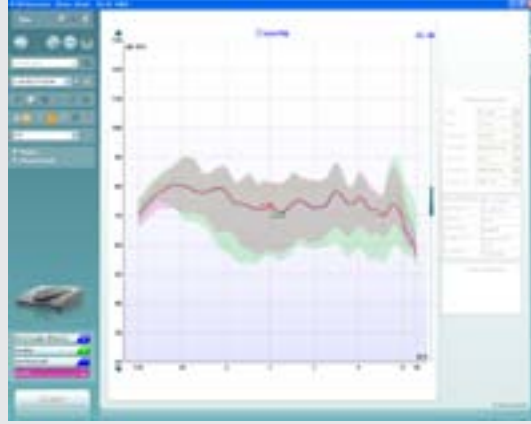

Akustik şeffaflık doğrulaması. Bir Amigo R12 alıcı Safari 900 13P BTE ile kullanıldığında, Amigo T30/T31 frekans alanının tamamını kullanma avantajına sahip olur. Amigo yüksek frekanslarda dahi, Safari'nin frekans alanı ile eşleşir ve istenen akustik çıkışı sağlar.

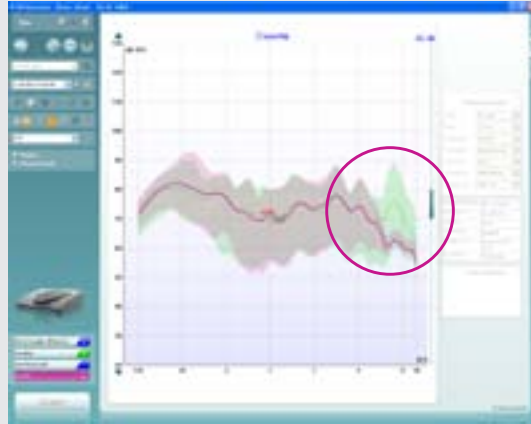

Diğer FM sistemleri işitme cihazların yüksek frekanslı çıkışları ile eşleşemez.

Amigo'dan daha net alamaz

Günümüzün gelişmiş işitme cihazları tarafından sunulan ve daha geniş olan frekans alanını kullanmak için tasarlanmış olan bir FM sistemi ile çocuklar, işitmeye ihtiyaç duydukları sesleri daha fazla kazanırlar(Lindley, 2009).

Yukarıdaki grafiklerde gösterildiği gibi, Amigo'nun frekans alanı daha geniş frekans alanına sahip cihazlar ile daha fazla eşleşmektedir ve dolayısı ile pazardaki kulak seviyesinde FM sistemlerinden daha geniş bir akustik şeffaflık sunar. Bu nedenle profesyonellerin hangi FM sisteminin en fazla işitsel bilgiyi sağlayacağı konusunda düşünmelerine gerek yoktur.

Güvenebileceğiniz doğrulama

- Amigo, en gelişmiş Yardımcı İşitme Teknolojilerini doğrulama kuralları ile uyumu kolaylaştırır.
- Amigo alıcısındaki kazancı değiştirmez, bu nedenle odyologlar onun sinyal sadakatine güvenebilir.

Referanslar:

- Crukley, J. and Scollie, S. (2010): A school-age listening landscape: Implications for hearing aids. IHCON conference, Lake Tahoe, California, August 2010 (poster).*
- Flexer, C. (1995): Classroom management of children with minimal hearing loss. The Hearing Journal, 48 (10), 53-58.*
- Kortekaas R. and Stelmachowicz P. (2000): Bandwidth effects on children's perception of the inflectional morpheme /s/: acoustical measurements, auditory detection, and clarity rating. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 43: 645-660.*
- Lindley, G. (2009): Children seen to gain extra benefit from greater bandwidth, binaural compression. The Hearing Journal. 62 (10), 28-33.*

Kolay
kullanım

Daha fazla
konusmayı işitmek



Öğretmenler duyulmak ister

Öğretmenler hareket halinde ve/veya takım halinde çalıştığında Amigo'nun her bir kelimeyi ilettiğinden emin olabilirler.



Günümüz okul öğretimleri genellikle dinamik ve interaktiftir. Öğretmen ve öğrenciler çok fazla hareket halindedir. Öğrenciler genellikle gruplar halindedir ve iki öğretmenle birlikte ders yaparlar. Takım Eğitiminde, öğretmenler işitdiklerinden emin olmak isterler, hatta aynı anda ikisi birden konuşuyor olsalar bile. Bazı FM sistemleri öğretmenin biri konuşmaya başladığında diğerinin sesini kapatırken, Amigo konuşmanın doğal takibini korumak adına her ikisinin de sesini işitilebilir seviyede tutar.

**Güven
verir**

**Sağlam
tasarım**

**Hiçbir çocuk
geri kalmamalı**



Çocuklar devam etmek ister

Takım Eğitiminin doğal halini Amigo nasıl korur

Takım Eğitimi vericisi - T31 - her iki öğretmenin konuşma sesini doğrudan çocuğun FM alıcısına göndererek doğal etkileşimi destekler.

Konuşmalarda yapay kesintiler olmadığından, öğretmenler susup birbirlerini beklemek zorunda kalmazlar, böylece rahat olup, özgürce iletişim kurabilirler.

Bu sayede işitme kayıplı öğrenciler, normal işiten arkadaşları ile aynı şekilde öğretmenlerinin konuşmalarını duyar ve doğal olarak cevap verip, aktif olarak konuşmalara katılabilirler.

Çocuklar duyduklarını takip edip yorumlamak için büyük bir çaba harcar. Aralıklı olarak oluşan gürültülere karşı daha fazla koruma sunabiliriz ve böylece onlar devam etmek için daha fazla enerjiye sahip olurlar. Amigo konuşma sinyalinin bütünlüğünü korumak için sürekli arka plan gürültüsünü azalttığı gibi, sessiz durumda da gürültüleri azaltmak için bütün imkanları kullanır. Öğretmenin konuşması bittiğinde,


Amigo alıcısındaki Sessiz fonksiyonu alıcı gürültüsünü 8dB düşürür, böylece çocuk gereksiz yere yorulmaz ve dikkati dağılmaz. Bu sayede çocuk sınıf arkadaşları ile çok daha rahat ve kolay sohbet edebilir. Doğal olarak öğretmen tekrar konuşmaya başladığı anda Sessiz fonksiyon iptal edilir.

Standart FM sistemi



Standart FM alıcısı ile.

Sessiz fonksiyonlu Amigo

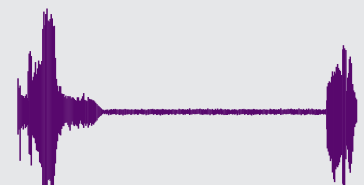

Akılcı Sessiz fonksiyonu ile Amigo alıcısı gürültüyü 8 dB azaltır.

**Kolay
kullanım**

**Daha fazla
konuşmayı işitmek**

Varsayıma dayalı FM çalışmasını kaldırır

Bazı FM sistemleri ile öğretmenler, öğrencilerin sinyal aldığını varsaymak zorunda kalır. Amigo kullananlar ise, bundan emindir.

Öğrencilerin FM sistemlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için, öğretmenler ders sırasında ara vermek zorunda kalmak istemez. Bu dersin aksamasına ve işitme cihazlı çocuğun üzerine istenmeyen dikkatlerin toplanmasına neden olur. Ayrıca, küçük çocukların vereceği cevaplara da güvenilemez.

**Tam güvence sağlayan
anında onaylama**

Amigo T30/T31 vericileri ve Amigo

alıcılarındaki LED gösterge varsayıma dayalı çalışmayı FM sistemlerinden kaldırır. Vericideki LED gösterge ünitenin açık olup olmadığını, şarja ihtiyacı olup olmadığını veya sessiz konumda olup olmadığını gösterir.

Ayrıca öğretmenler sinyalin sabit kalacağından emin olabilir, çünkü son derece sağlam olan sinyal iletimi, kesinti risklerini minimuma indirir.



İki küçük ışık her şeyi anlatır



Verici LED ışığının bildirimleri:

- Ünite açık veya kapalı
- Şarj ihtiyacı var/yok
- Ünite açık veya sessiz konumda

Alıcı LED ışığının bildirimleri:

- Alıcı açık
- Verici ve alıcı aynı kanalda
- Çocuk istikrarlı bir FM girdisi alıyor
- Pili çalışıyor



Güven
verir

Sağlam
tasarım

Hiçbir çocuk
geri kalmamalı



Zeki ve esnek alıcılar



- Evrensel Amigo alıcıları (R1 veya R2) kullanıldığında LED ışığı arkadan veya önden görülebilecek şekilde konumlandırılabilir
- Amigo alıcıların çoğunun LED ışığı sürekli parlayacak, saniyede bir kırpacak veya hiç parlamayacak şekilde programlanabilir
- Amigo alıcıları istenmeden oluşabilecek kanal değişimini önlemek için, en son kullanılan kanalda veya ilk önerilen kanalda açılacak şekilde programlanabilir
- Gerekirse alıcının bütün düğmelerinin çalışması iptal edilebilir.

**Kolay
kullanım**

**Daha fazla
konuşmayı işitmek**



Düğmeleri 1,000,000 defa basmayı tolere edebilir ve neme karşı yüksek dayanıklılık için silikon su geçirmez bir kaplama ile kaplıdır.



Sert çerçevesi Amigo'un iç aksamalarını korur. Yumuşak lastik kaplamaları ise, düşme ve çarpmalara karşı darbe emiciliği sağlar.



Mikrofon jackı 10,000 defalık girişi tolere edebilir.



Dayanıklı LCD ekran kırılmaz polikarbonat malzemeden yapılmıştır

Öğretmenler güvenebilecekleri çözümler ister

Sistemin arızalanması hem öğretmenin hem de çocukların işini zorlaştırabilir. Bu nedenle Amigo çok sağlam yapılmıştır.

Öğretmenler ve odyologlar FM sistemlerindeki sorunları çözmek için değerli zamanlarını harcamak zorunda kalmaları bile, okul sınıfları yeterince zorlu ortamlardır. Zorlu okul ortamları Amigo için sorun değildir. Dış kabininden içindeki parçalara kadar Amigo şuna kadar yapılmış en sağlam FM çözümüdür.

Amigo güvenlik özellikleri:

- Kaza ile düşmelere karşı dayanıklı
- Nem önleyici yapı
- Güvenli şarj

Amigo neden çok güvenilirdir

Kazalara karşı dayanıklı

Amigo FM vericileri kaza ile çarpıp düşmelere karşı çok daha dayanıklıdır. Ultrasonik kaynakla birleştirilen ve esnek lastik kaplamalı kabini sıra dışı bir dayanıklılık sağlar, böylece günlük aşınma ve yıpranmalara karşı yüksek esneklik sunar.

Nem geçirmez

Vericiye boyalı, ıslak veya sıcak

kahveli bir parmakla güvenle temas edebilirsiniz. Silikon kaplamalı düğmeleri onun hem neme karşı dayanıklı hem de kolay temizlenebilir olmasını sağlar.

Güvenli pil şarjı

Amigo T30/T31 bir adet şarj edilebilir AA NiMH pil kullanır ve gerektiğinde standart bir alkalini kalem pille de çalıştırılabilir.

Güven
verir

Sağlam
tasarım

Hiçbir çocuk
geri kalmamalı



Amigo ailesini tanıyalım

Amigo T31 verici



- Tek aygıt üzerinde verici ve programlama
- Programlama alanı ~ 1-35 cm
- Kapsadığı FM bantları: 169-177 MHz, 180-188 MHz ve 216-218 MHz
- Bant genişliği 8.5 kHz
- Dijital Sinyal İşleme

- Mikrofon kablosu içinde dış anten
- FM Kanal Sihirbazı
- FM kanalları ekranı
- En iyi FM kanalını bulma ekranı
- Takım Eğitimi fonksiyonu
- USB girişi ile yazılım/kanal güncellemesi

- AA Standart NiMH piller
- Güvenli şarj sensörleri
- Tuş kilidi
- 10 saatten fazla pil ömrü
- Tek dokunuşta sessiz konum

Uyum özgürlüğü

Amigo tam bir uyum özgürlüğü sunar. FM alıcıları her bir çocuğun kişisel tercihini karşılamak için, farklı çeşitlerde sunulmaktadır. Klipsliden, kulak seviyesinde alıcılardan, çekici Amigo Arc neckloop alıcıya kadar.

Her marka kulak arkası işitme cihazları ile uyumlu olduğundan, Amigo evrensel alıcıları, zamanla düzenli olarak işitme cihazlarını yenileyen büyüme çağındaki çocuklar için kusursuz bir seçimdir. Amigo alıcıları, sınıf yaşamını kolaylaştırmak için, bütün Amigo vericileri ve diğer markaların FM vericilerinin çoğu ile uyumlu çalışır.


Amigo ailesi



Oticon Amigo T30: Eğitim ortamlarında kullanmak için vücuda takılan verici. Bu verici aynı zamanda bir programlama ünitesi olarak da kullanılır.



Oticon Amigo T31: Bazı fonksiyonları T30 gibidir, fakat aynı zamanda Takım Eğitimi olanağını da sunar.

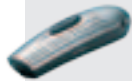

Oticon Amigo T10: Sınıflarda ve evde kullanmak için çok amaçlı verici.



Oticon Amigo T5: Uygun fiyata çözüm sunan, eğitim ortamları için önerilen verici.



Oticon Amigo WRP: Bütün Amigo alıcılarını kablosuz programlamak için kullanılan Kablosuz Alıcı Programlayıcısı ve proaktif kanal yönetimi için FM kanal sihirbazı fonksiyonunu sunar.



Amigo eZync: Amigo alıcıları ile otomatik olarak anlık eşleştirme sağlayarak, bireysel eşleştirme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Amigo'nun günlük kullanımı



Eğitim/öğretim



Eğitim/Takım
Eğitimi




T30 /T31



Alıcı ile birlikte işitme cihazı



Amigo Arc neckloop alıcı

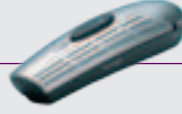

T10



Aile ve dostlarla dışarıda
veya evde akşam yemeği



Araba yolculuğu



Sosyal grup aktiviteleri



Spor ve antrenörlü
aktiviteler



TV

FM sistemleri okul dışında da paha biçilmezdir. T30/T31 vericileri eğitim ve öğretim ortamlarında iletişimi artırmak için tasarlanmış iken, taşınabilir, çok fonksiyonlu T10 verici de evde veya özel kullanımlar için kusursuzdur. T10 vericisi elde tutularak, bir masa üzerine oturtularak veya boyuna asılarak kullanılabilir.



Müzik aygıtı/MP3



PC



Oticon Amigo Arc: Her çeşit telecoil'li işitme cihazı ve koklear implantlar için, evrensel Neckloop alıcı. Beş farklı renkte sunulmaktadır.



Oticon Amigo R1: Her çeşit kulak arkası işitme cihazı ve ayrıca Amigo FM-CI adaptörü ile koklear implantlarda kullanmak için evrensel alıcı.



Oticon Amigo R2: Amigo R1 ile aynı fonksiyonlar ve tek bir düğme ile açma/kapama ve kanal arama olanağı sunar.



Oticon Amigo R2BA: Oticon Medical Ponto kemik bağlantılı ses işlemcileri için evrensel bir alıcı. Amigo R2 ile aynı fonksiyonları sunar.



Oticon Amigo R5: Düşük maliyetli vücuda takılan alıcı. Kulaklık, neckloop veya DAI kablosu ile bağlantı sağlar.



Oticon Amigo R7: Oticon Sumo BTE için adanmış alıcı. Amigo R2 ile aynı fonksiyonları sunar.



Oticon Amigo R12: Oticon Safari de dahil Oticon'un kulak arkası ve RITE modelleri için adanmış alıcı. Açmak/kapamak ve kanal aramak için dokunmatik düğmeli. Oticon işitme cihazları ile uyum sağlayan 13 farklı renkte sunulur.

Mikrofonlar: Omni, Direksiyonel veya Boom



Taşıma opsiyonları: Bel klipsi, bel kayışı.

Kaplamalar: Bütün Amigo vericileri ve Amigo R5 alıcılar için 10 kabin rengi.



**Kolay
kullanım**

**Daha fazla
konuşmayı işitmek**



Hiç bir çocuk geri kalmamalı

Çocuk işitme cihazı, koklear implant veya kemik bağlantılı aygıt kullanıyor olsa da, Amigo ona güvenilir bir yol arkadaşı olacaktır.

Herkes için kullanıcı dostu FM!

FM çözümlerini tasarlarken hiçbir çocuğun geride kalmamasına son derece büyük özen göstermekteyiz. İşitme cihazı, koklear implant, kemik bağlantılı aygıt kullananlar veya işitsel kavrama zorluğunda ek desteğe ihtiyaçları olanlar Amigo çözümlerinden faydalanabilirler.

Okulda, evde

- veya başka bir yerde FM!

FM'in faydaları sadece sınıfta bitmez. Okul dışı kullanım için olan portatif çözümler ebeveyn ve bakıcılar için son derece kullanışlıdır. Oyun alanlarında, spor merkezlerinde, işte veya arabada, bu çözümler konuşmaya istikrarlı bir geçiş sağlar. Bu çözümlerle çocuklar nereye giderse gitsinler, kendilerini geride kalmış hissetmezler.

**Güven
verir**

**Sağlam
tasarım**

**Hiçbir çocuk
geri kalmamalı**



Öğretmen ve odyologları destekler

Oticon, yeni bir çözüme geçişte, öğretmenlerin karşılaşılabileceği engelleri ortadan kaldırmak için, kullanımı, güvenilirliği ve sorunların giderilmesi kolay olan sistemler tasarlayarak çaba harcar.

Hangi performans kategorisini seçerlerse seçsinler, Amigo gün ve gün istediklerini sunacaktır.

Eğitim malzemeleri, egzersiz ve sorun giderme önerileri de teslim listemizde mevcuttur. Bununla birlikte küçük ve

geniş kapsamlı okul sistemleri, genel ve bireysel sınıflar ve her yaştan çocukların farklı ihtiyaçlarını karşılayacak servis planı da sunabiliriz.

Bunların hepsi, çocukların gerçek hayatla baş etmelerine, başarı ile yardımcı olmak için, odyolog ve öğretmenlerin günlük çabalarını destekler. Böylece ortak çabalarımızla, işitme kayıplı ve işitsel işleme bozukluğu olan çocuklar kendi gerçek potansiyellerini gösterme şansına sahip olur!

child
friendly
hearing
care

İşitme kayıplı çocukların potansiyellerinin tümüne erişmelerini sağlamak, tam anlamıyla kendini buna adanmış bir yaklaşım gerektirir. İşte biz bu nedenle çocuklara hak ettikleri fırsatları sağlamak için, profesyonellere ve diğer ilgili kişilere gerekli çözüm ve hizmetleri sunuyoruz. Çocuk dostu işitme bakımının anlamı da budur.

